



**Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice, avant d'utiliser le dispositif médical.**

- Veillez conserver la notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement.
- Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.

## **1. Qu'est-ce que TOXAPREVENT® MEDI PLUS et dans quels cas est-il utilisé ?**

TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre est un dispositif médical naturel contenant la composant minérale MANC®, la clinoptilolite zéolite naturelle avec un plus en carbonate de calcium et de magnésium. Il sert à renforcer la barrière de la paroi intestinale en cas de contraintes physiques répétitives. La substance MANC® traverse le tractus intestinal où elle produit son effet physique. Elle ne sera pas métabolisée.

## **2. Que faut-il savoir avant l'usage de TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?**

- L'emballage des sticks ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'utilisation, avant de diluer la poudre dans du liquide.
- N'ouvrez que le nombre d'emballages dont vous avez besoin au moment de la prise du dispositif médical.

### **TOXAPREVENT® MEDI PLUS ne doit pas être utilisé :**

- En cas d'allergie connue ou d'hypersensibilité à l'un ou plusieurs composants du médicament. (voir point 6 : Composants et substances)
- Il est indiqué de ne pas utiliser les dispositifs médicaux TOXAPREVENT® pendant la grossesse et l'allaitement en raison d'analyses insuffisantes sur les femmes enceintes ou allaitantes.

### **Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS lorsque :**

- Dans de rares cas, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre peut provoquer une constipation (obstipation) ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).
- Si vous souffrez de constipation chronique, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre nécessite une attention particulière. Dans ce cas-là, veuillez consulter votre médecin, thérapeute ou pharmacien avant la prise du dispositif médical.
- Veillez à boire suffisamment lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre, afin de prévenir les effets d'obstipation (constipation).
- Il n'existe aucune donnée suffisante sur l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS chez l'enfant. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser ce dispositif médical chez les enfants de moins de 12 ans.
- En cas de prédisposition à la formation de calculs rénaux, veuillez consulter votre médecin avant la prise de ce dispositif médical.

## **Lors de l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS avec des médicaments :**

Étant donné qu'il n'existe aucune étude systématique au sujet des interactions ou influences médicamenteuses suite à la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre, il est recommandé de respecter un intervalle de temps de 2 heures, pour éviter les interactions médicamenteuses indésirables. Si vous prenez des médicaments, déterminez l'intervalle de temps requis pour la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS avec votre médecin ou thérapeute.

## **3. Comment faut-il prendre TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?**

- Sauf prescription contraire de votre médecin ou thérapeute, veuillez prendre 1 à 2 sachets dans suffisamment de liquide (p. ex. avec 200 ml d'eau plate) environ 30 minutes avant un repas.
- Une quantité maximale journalière de 2 sticks (correspond à 2 fois un contenu de 3 g) ne devrait pas être dépassée.
- Si vous souhaitez changer la prise journalière, veuillez consulter auparavant votre médecin ou thérapeute.

### **Durée d'utilisation**

La durée du traitement avec TOXAPREVENT® MEDI PLUS ne doit pas dépasser 30 jours. En cas d'utilisation répétée, il convient de respecter une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement.

### **Mesures à prendre en cas d'erreurs d'utilisation, de surdose et d'effets secondaires :**

Si vous avez pris une dose supérieure à celle qui était prévue, des effets secondaires accrus peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il est recommandé de réduire la prise à un stick par jour au maximum ou d'arrêter le cas échéant le traitement. En même temps, il faut veiller à une hydratation suffisante. En cas d'effets secondaires persistants, arrêtez le traitement et consultez votre médecin ou thérapeute.

## **4. Quels sont les effets secondaires possibles ?**

Dans de rares cas, ce dispositif médical peut entraîner une constipation ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).

### **Déclarations d'effets secondaires**

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'utilisation, veuillez en informer votre médecin, thérapeute, pharmacien et/ ou l'adresse e-mail ci-dessous de FROXIMUN AG ou contactez-nous à l'aide du numéro d'assistance figurant également ci-dessous.



**FRANÇAIS**

Fabricant et bureau de déclaration : FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt  
Téléphone : +49 39401 632-0  
Téléfax : +49 39401 632-199  
E-mail : anwender@froximun.de  
Personne responsable : +49 39401 632-320

**5. Où faut-il conserver TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?**

- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à une température entre 5°C - 40°C
- Protéger de l'ensoleillement direct
- Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée
- date limite d'utilisation : voir carton pliable ou gaufrage/impression sur l'emballage des sticks

**6. Autres informations**

**Composants et autres substances**

- 1 stick contient 3 000 mg de poudre
- Composants : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle), carbonate de calcium, carbonate de magnésium

**Information concernant MANC® :**

- 100 % naturel, sans gluten, sans lactose
- Concernant la substance, il s'agit d'un aluminosilicate modifié
- Casher, halal : nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus a été fabriqué selon un procédé avec des matières premières minérales. Le produit ne contient aucun constituant d'origine animale, du sang ou des produits dérivés du sang, ni d'alcool.
- Pour la production de MANC® seules des matières premières d'origine minérale sont utilisées.

**Information concernant le carbonate de calcium, carbonate de magnésium :**

- Sans allergène
- kascher, halal, végétarien, végétalien

**7. Fabricant de produits médicaux**

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,  
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199,  
Adresse e-mail: info@froximun.de

**Date de la dernière révision de la notice: 2022-05-25**



Conserver hors de la portée des enfants

