

FRANÇAIS

Veillez lire attentivement l'ensemble de cette notice avant de commencer à utiliser ce dispositif médical.

- Pour toute autre question, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute, pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est en vente libre et sans prescription médicale.

1. Qu'est-ce que la poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 et dans quel cas est-elle utilisée ?

La poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 à usage externe est un produit médical naturel destiné à favoriser la cicatrisation en cas de lésions cutanées superficielles ou d'irritations de la peau.

Domaines d'application :

- adsorption des sécrétions de la plaie
- éruptions cutanées suintantes
- petites plaies cutanées superficielles ou légères écorchures (plaies fermées)

2. Quelles sont les précautions à prendre avant d'utiliser la poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 ?

- Ouvrir la boîte juste avant l'application.
- Veiller à ce que la boîte soit toujours fermée.
- La poudre pour la peau ne doit être utilisée que pour l'usage spécifique décrit dans la présente notice d'utilisation !
- Ne pas saupoudrer la poudre dans les yeux, les oreilles ou le nez.
- Ne pas inhaler la poudre.

La poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 ne doit pas être utilisée :

En cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à l'un des composants (voir point 6 : Composants).

3. Comment utiliser la poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 ?

- Saupoudrer la quantité de poudre nécessaire sur la partie du corps préalablement nettoyée.
- Utilisation quotidienne répétée recommandée.
- Ne répéter l'application qu'après avoir nettoyé la plaie.
- Nettoyer la zone traitée après 24 h au plus tard.

Durée d'utilisation

L'application peut être poursuivie jusqu'à la cicatrisation de la plaie. Veuillez consulter un médecin ou un professionnel de la santé si vos symptômes ne s'améliorent pas.

Mesures à prendre en cas d'erreur d'utilisation, de surdosage et d'effets secondaires :

- Aucun cas de surdosage n'a été reporté.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire et, si nécessaire, consulter un professionnel de la santé.

4. Quels sont les effets indésirables connus ?

Aucun effet indésirable n'est connu.

Déclarations des effets indésirables

Si vous constatez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin, votre thérapeute ou votre pharmacien. Veuillez également les signaler à FROXIMUN AG en utilisant les coordonnées figurant ci-dessous :

Fabricant bureau	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
d'immatriculation :	38838 Schlanstedt, Allemagne
Téléphone :	+49 39401 632-0
Fax :	+49 39401 632-199
E-Mail :	anwender@froximun.de
Personne responsable (PRRC) :	+49 39401 632-320

5. Comment conserver la poudre pour la peau Dr. Skin NC 100 ?

- conserver hors de portée des enfants
- stocker au sec et entre 5°C - 40 °C
- protéger de la lumière du soleil
- utilisable jusqu'à voir gaufrage/impression sur le bord de l'étiquette et de la boîte pliante

6. Informations complémentaires

Contenu et composants

- Contenu de l'emballage : 2 boîtes de 4 g de poudre, notice d'utilisation à l'intérieur de l'étiquette
- Composants : MANC® (zéolithe naturelle-clinoptilolithe)

Informations sur le MANC® :

- 100 % naturel, sans gluten, sans lactose
- Le MANC® est un aluminosilicate modifié.
- casher, halal : Nous confirmons par la présente que le MANC® est produit dans le cadre d'un processus utilisant des matières premières minérales. Le produit ne contient pas d'ingrédients d'origine animale, de sang ou de produits dérivés, ni d'alcool.

7. Informations sur le fabricant

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Téléphone : +49 39401 632-0, Fax : +49 39401 632-199
E-mail : info@froximun.de


La dernière révision de cette notice d'utilisation a été établie le : 10/04/2024

FRANÇAIS**Avertissements et consignes de sécurité**

Fabricant



Consulter la notice d'utilisation

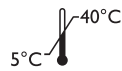

stocker entre 5 °C et 40 °C



LOT, Numéro de lot



conserver au sec

conserver hors de portée
des enfants

Utilisable jusqu'au



protéger de la lumière du soleil



Dispositif médical