

ITALIANO

Leggere attentamente queste informazioni per l'uso prima di iniziare ad assumere questo dispositivo medico.

- Conservare il presente foglio informativo per eventuali consultazioni future.
- Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico, al terapeuta, al farmacista o direttamente a FROXIMUN AG in qualità di produttore.
- Il presente dispositivo medico può essere acquistato senza prescrizione medica.

1. Che cos'è la sospensione TOXAPREVENT® SKIN e per cosa si utilizza?

La sospensione TOXAPREVENT® SKIN è un dispositivo medico naturale che favorisce la guarigione della superficie cutanea e della ferita legando localmente l'essudato e l'istamina.

In particolare nei seguenti casi:

- infiammazione della pelle, irritazioni cutanee e ferite chiuse
- prurito e arrossamento cutaneo non specifici
- punture di insetti (non sostituisce un antistaminico!)
- problemi cutanei non specifici con derma non lacerato

2. Cosa bisogna tenere in considerazione quando si usa la sospensione TOXAPREVENT® SKIN!

- **Non sostituisce un antistaminico!**
- La sospensione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi indicati nel presente informazioni per l'uso.
- Non applicare la sospensione su ferite aperte.
- Interrompere l'applicazione se si nota un effetto insolito. Consultare eventualmente un medico e/o un farmacista.
- La sospensione non deve finire negli occhi o in altri orifizi del corpo. Applicare la sospensione con particolare cautela in prossimità degli orifizi del corpo.
- In caso di applicazioni sul viso, predisporre opportunamente la pellicola praticando dei fori per occhi, naso e bocca.
- Dopo la somministrazione di farmaci sotto forma di creme, pomate, ecc. attendere almeno 60 minuti prima di applicare la sospensione. In caso di dubbi, consultare il medico o il farmacista in merito all'uso del dispositivo medico in concomitanza con l'uso di farmaci.
- Evitare il contatto con la sospensione usata e con la ferita.
- Aprire il tubetto della sospensione soltanto immediatamente prima dell'uso. Chiudere bene il tubetto dopo aver prelevato la quantità desiderata di prodotto.
- Una volta prelevata dal tubetto, la sospensione deve essere utilizzata una sola volta.
- Dopo l'uso, è possibile smaltire la pellicola e la sospensione insieme ai rifiuti domestici.

3. Come si usa la sospensione TOXAPREVENT® SKIN?

Per un corretto utilizzo può essere necessaria l'assistenza di una seconda persona, in particolare se le capacità motorie sono limitate o se si utilizza la sospensione in zone difficilmente raggiungibili. Salvo diversa prescrizione medica:

- Applicare uno strato sottile di circa 2 mm della sospensione sulla zona cutanea interessata e coprirlo con un adeguato pezzo di pellicola in dotazione.

- Per coprire la sospensione, utilizzare esclusivamente la pellicola in dotazione. Altre pellicole possono contenere plastificanti che potrebbero causare irritazioni cutanee e danni alla salute.
- Il tempo di applicazione deve essere di almeno 30 minuti.
- Rimuovere la sospensione quando è visibilmente asciutta.
- L'applicazione può essere effettuata più volte al giorno. Ripetere l'applicazione solo dopo aver pulito la zona trattata.
- Salvo diversa prescrizione, sospendere il trattamento per 5 giorni ogni 14 giorni consecutivi di applicazione.

4. Segnalazione di effetti indesiderati

Se si notano effetti collaterali, si prega di informare il medico, il terapeuta o il farmacista. Si prega di segnalarlo anche a FROXIMUN AG utilizzando i seguenti dati di contatto:

Produttore e contatti: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
D - 38838 Schlanstedt
Telefono: +49 (0) 39401 632-0
Fax: +49 (0) 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Persona responsabile (PRRC): +49 39401 632-320

5. Come si conserva la sospensione TOXAPREVENT® SKIN?

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in luogo asciutto tra 5°C e 30°C.
- Proteggere dalla luce solare diretta.
- Utilizzabile fino a: vedi goffratura/stampa sulla scatola pieghevole/piega del tubetto.
- Dopo l'apertura del tubetto, consumare il prodotto entro due settimane.

6. Ulteriori informazioni

Ingredienti:

Clinoptilolite (MANC®), acqua colloidale

Informazioni su MANC®:

- Naturale al 100%
- MANC® è un alluminosilicato modificato.
- Kosher, halal: Con la presente confermiamo che MANC® è composto da materie prime minerali. Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale, sangue e suoi derivati o alcol.

7. Produttore del prodotto medicinale

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199
E-mail: info@froximun.de

Il presente foglietto illustrativo è stato aggiornato il: 2025-04-28