

ITALIANO

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di iniziare ad assumere questo dispositivo medico.

- Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico, al terapeuta, al farmacista o direttamente a FROXIMUN AG in qualità di produttore.
- Il presente dispositivo medico può essere acquistato senza prescrizione medica.

1. Che cos'è la polvere cutanea Dr. Skin NC 100 e per cosa si utilizza?

La polvere cutanea Dr. Skin NC 100 per uso esterno è un prodotto medico naturale che favorisce la guarigione delle ferite in caso di lesioni cutanee superficiali o irritazioni della pelle.

Aree di applicazione:

- Assorbimento delle secrezioni della ferita
- Eruzioni cutanee lacrimose
- Ferite cutanee minori e superficiali o abrasioni lievi (non ferite aperte)

2. Cosa bisogna considerare prima di utilizzare la polvere cutanea Dr. Skin NC 100?

- Aprire la confezione soltanto immediatamente prima dell'uso.
- Assicurarsi che la confezione sia sempre ben chiusa.
- La polvere cutanea deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi indicati nel presente foglietto illustrativo.
- Non spargere la polvere negli occhi, nelle orecchie o nel naso.
- Non inalare la polvere.

Nei seguenti casi non è consentito l'uso della polvere cutanea Dr. Skin NC 100:

In caso di allergia o ipersensibilità nota all'ingrediente. (cfr. punto 6: Ingredienti)

3. Come si usa la polvere cutanea Dr. Skin NC 100?

- Cospargere la polvere sulla zona del corpo precedentemente detera, secondo le necessità.
- Si consiglia di usare il prodotto più volte al giorno.
- Ripetere l'applicazione solo dopo aver pulito la ferita.
- Pulire l'area trattata dopo massimo 24 ore.

Durata dell'utilizzo

L'applicazione può essere continuata fino alla guarigione della ferita. Se i sintomi non migliorano, consultare un medico o un operatore sanitario.

Contromisure in caso di uso scorretto, sovradosaggio ed effetti indesiderati:

- Non sono noti casi di sovradosaggio.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e, se necessario, consultare un medico.

4. Quali sono gli effetti indesiderati noti?

Non sono noti effetti collaterali.

Segnalazione di effetti collaterali

Se si notano effetti indesiderati, informare il medico, il terapeuta o il farmacista. Si prega di segnalarlo anche a FROXIMUN AG utilizzando i dettagli di contatto riportati di seguito:

Produttore e contatti: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,
D - 38838 Schlanstedt
Telefono: +49 39401 632-0
Fax: +49 39401 632-199
E-mail: anwender@froximun.de
Persona responsabile (PRRC): +49 39401 632-320

5. Come deve essere conservata la polvere cutanea Dr. Skin NC 100?

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 °C e - 40 °C
- Tenere al riparo dalla luce solare
- Può essere utilizzato fino a vedere la goffratura/impronta sul bordo dell'etichetta e della scatola pieghevole

6. Ulteriori informazioni

Contenuto e ingredienti

- Contenuto della confezione: 2 confezioni con 4 g di polvere, foglietto illustrativo all'interno dell'etichetta
- Ingrediente: MANC® (zeolite naturale clinoptilolite)

Informazioni sull'ingrediente MANC®:

- 100% naturale, senza glutine e senza lattosio
- Il MANC® è un alluminosilicato modificato.
- Kosher, halal: con la presente confermiamo che il MANC® è prodotto in un processo che parte da materie prime minerali. Il prodotto non contiene componenti derivati da animali, sangue o suoi prodotti secondari o alcool.

7. Informazioni sul produttore

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Germany
Telefono: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199
eMail: info@froximun.de

Il presente foglietto illustrativo è stato aggiornato il: 10-04-2024

ITALIANO**Avvertenze e istruzioni di sicurezza**

Produttore



Osservare il foglietto illustrativo



Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e - 40 °C



LOT, Numero di lotto



Conservare in un luogo asciutto



Tenere fuori dalla portata dei bambini



Utilizzabile fino a



Tenere al riparo dallaluce solare



Dispositivo medico